

INSTRUÇÕES DE USO RÁPIDAS



1 Posicione a antena sobre o estimulador.

3 Pressione o botão + ____ vezes.

2 Pressione o botão **LIGAR** no transmissor. A luz verde piscará.

4 Ajuste a posição da antena para melhor alinhamento e conforto.

PRESSIONE + E - AO MESMO TEMPO PARA ALTERNAR OS PROGRAMAS

Programa 1: A luz verde pisca UMA vez

Programa 2: A luz verde pisca DUAS vezes

Programa 3: A luz verde pisca TRÊS vezes

TRANSMISSOR

- O dispositivo está LIGADO
- A bateria está carregando
- A bateria está totalmente carregada
- A antena está desconectada



Carregando

Ao ligar na tomada, uma luz azul fixa significa que o dispositivo está carregando. Uma luz azul piscante significa que o dispositivo está completamente carregado.



Antena

Se houver uma luz amarela fixa, verifique a conexão da antena e do transmissor. Eles podem estar desconectados, ou não estarem conectados corretamente. Desconecte e volte a conectar.



INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO:

TELEFONE: _____

NOME: _____

E-MAIL: _____